



# INTELLIGENE®

**ABY ZAPEWNIĆ NAJWYŻSZY STANDARD BADANIA, POSTĘPUJ ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI ZAWARTYMI W INSTRUKCJI!**

## ZESTAW POBRANIOWY ZAWIERA:

- pudełko,
- torbę biohazard,
- instrukcję pobrania próbki,
- formularz świadomej zgody,
- kartę próbki krwi,
- 2 nakłuwacze (lancety),
- 2 plastry,
- 2 chusteczki z alkoholem,
- sterylna gaza,
- woreczek strunowy na kartę próbki krwi,
- opakowanie środka osuszającego.

MATERIAŁEM DO BADANIA JEST **PRÓBKA KRWI**  
POBRANA Z OPUSZKA PALCA NA SPECJALNĄ KARTĘ

## PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU DIAGNOSTYCZNEGO:

1. Wypełnij oraz podpisz formularz świadomej zgody.
2. Oznacz kartę do pobrania próbki krwi swoim imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia oraz datą pobrania próbki. Napisz datę pobrania na formularzu świadomej zgody.
3. Pobierz próbkę krwi zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na następnej stronie.
4. Gotową próbkę umieść w woreczku biohazard, a następnie w pudełku wraz z dokumentami. Tak przygotowaną paczkę wyślij kurierem do Centrum Św. Łukasza.



## INSTRUKCJA POBRANIA PRÓBKI KRWI:

**ABY ZAPEWNIĆ NAJWYŻSZY STANDARD BADANIA, POSTĘPUJ ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI ZAWARTYMI W INSTRUKCJI!**



**KROK 1:** Przed pobraniem próbki oznacz kartę do pobrania próbki krwi swoim imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia oraz datą pobrania próbki. Napisz datę pobrania na formularzu świadomej zgody!



**KROK 6:** Teraz mocno naciśnij białą końcówkę na czubku palca, aby zwolnić igłę. Po zwolnieniu igły i nakłuciu małego miejsca na palcu, igła natychmiast się cofnie. Możesz wtedy wyrzucić lancet. Szybko zetrzyj pierwszą kroplę krwi sterylnym wacikiem.



**KROK 2:** Przed pobraniem próbki krwi umyj ręce, osusz je czystym ręcznikiem i ogrzej dla lepszego przepływu krwi. Otwórz sterylny wacik do użycia później.



**KROK 7:** Delikatnie masuj (nie uciskaj) całą długość palca nakłutego kciukiem, aby powstała kropla krwi.




**KROK 3:** Umieść kartę próbki krwi na prostej powierzchni, polami (w kształcie kółek) skierowanymi do góry.



**KROK 8:** Gdy kropla krwi będzie gotowa, upuść ją na środek okręgu. Kontynuuj zbieranie, aż wszystkie kółka na karcie zostaną całkowicie wypełnione (może być konieczne powtórzenie procesu od kroku 4).



**KROK 4:** Wybierz palec do pobrania krwi (najlepiej środkowy lub serdeczny palec ręki, którą nie piszesz). Otwórz wacik nasączony alkoholem i przetrzyj nim wybrany palec. Pozostaw palec do wyschnięcia przez co najmniej minutę.

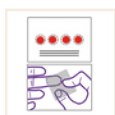


**KROK 9:** Po całkowitym wypełnieniu wszystkich kółek na karcie próbki krwi osusz palec sterylnym wacikiem i nałóż plaster.




**KROK 5:** Chwyć lancet za szeroki koniec. Odkręć wąską nasadkę na drugim końcu. Lancet jest teraz gotowy do użycia.



**KROK 10:** Pozostaw kartę próbki krwi do wyschnięcia na co najmniej cztery godziny. Po wyschnięciu umieść kartę w woreczku strunowym dołączonej do zestawu testowego. Przechowuj go w chłodnym, suchym miejscu, aż będziesz gotowy do wysyłki.

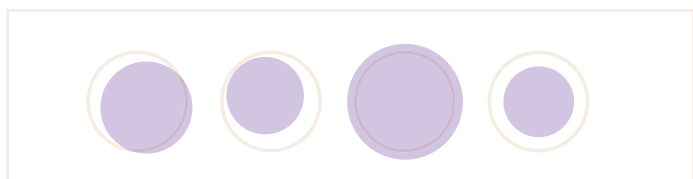

\*PRZYKŁAD **PRAWIDŁOWO** WYPEŁNIONYCH PÓL NA KARCIE PRÓBKII KRWI

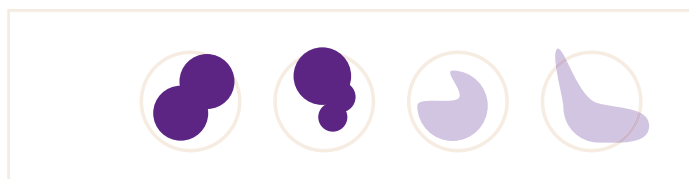

\*PRZYKŁAD **ŹŁE** WYPEŁNIONYCH PÓL NA KARCIE PRÓBKII KRWI



## **INSTRUKCJA ZAMAWIANIA ZESTAWÓW POBRANIOWYCH I WYSYŁKI MATERIAŁU**

**ABY ZAPEWNIĆ NAJWYŻSZY STANDARD BADANIA, POSTĘPUJ  
ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI ZAWARTYMI W INSTRUKCJI!**

Zestaw pobraniowy otrzymasz przesyłką kurierską do miejsca wyznaczonego przez Ciebie. Zestaw otrzymasz po opłaceniu badania.

1. Zamów zestaw pobraniowy w naszym Centrum, podając dokładne dane pacjenta oraz dane do wysyłki (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, nazwa firmy – jeżeli przesyłka ma dotrzeć do zakładu pracy).
2. Opłać badanie zgodnie z instrukcją w punkcie trzecim.
3. Zestaw zostanie wysłany po spełnieniu wszystkich warunków i dotrze do Ciebie w ciągu 1-3 dni roboczych. Dostawa możliwa jest tylko w dni robocze.
4. Po otrzymaniu zestawu pobierz próbki zgodnie z INSTRUKCJĄ POBRANIA, która znajduje się w środku zestawu pobraniowego.
5. Zanim wyślemy Ci zestaw pobraniowy musisz opłacić wybrane badania za pomocą przelewu lub Dotpay na stronie internetowej. Dane potrzebne do wykonania przelewu znajdują się poniżej:

**Centrum Św. Łukasza Krzysztof Majdyło Sp. k.**  
**ul. Narwicka 11a, 80-557 Gdańsk**  
**23 1140 2004 0000 3702 7797 0275**

Tytuł przelewu: SKLEP DIAGNOSTYKA oraz imię i nazwisko Pacjenta,  
np. SKLEP DIAGNOSTYKA, Jan Kowalski.





**POBRANIE MATERIAŁU POWINIENIEŚ WYKONAĆ RANO PRZED WYSYŁKĄ LUB MAKSYMALNIE DZIEŃ WCZEŚNIEJ. MATERIAŁ POBRANIOWY MA OGRANICZONĄ STABILNOŚĆ!**

**PRZYGOTOWANIE ZESTAWU POBRANIOWEGO DO WYSŁANIA:**

1. Przygotuj materiał pobraniowy zgodnie z **INSTRUKCJĄ POBRANIA**.
2. Wraz z zestawem pobraniowym dostaniesz skierowanie. Zakupione badania będą już zaznaczone na skierowaniu. Uzupełnij na skierowaniu dane Pacjenta w odpowiedniej rubryce, jeżeli nie są one już wpisane.
3. **POBRANIE MATERIAŁU POWINIENIEŚ WYKONAĆ RANO PRZED WYSYŁKĄ LUB MAKSYMALNIE DZIEŃ WCZEŚNIEJ.** Materiał do badań ma ograniczoną stabilność i musi jak najszybciej dotrzeć do laboratorium. Wysyłaj próbki tylko od poniedziałku do środy. Próbki muszą dotrzeć do naszego Centrum maksymalnie do czwartku do godziny **12:00!**
4. Zabezpieczony i zamknięty zestaw razem ze skierowaniami włóż do zaadresowanej, białej koperty bąbelkowej, którą otrzymałeś wraz z zestawem pobraniowym.
5. Następnie zamów dowolnego kuriera i wyślij zestaw na adres naszego Centrum:

**Centrum Św. Łukasza**  
**ul. Narwicka 11a, 80-557 Gdańsk**  
**tel.: + 48 58 600 44 44**  
**e-mail: [diagnostyka@swietylukasz.pl](mailto:diagnostyka@swietylukasz.pl)**

